



# Gebruikershandleiding

## *Excel* *Click & Go 'Lite'*

'Smart mobility solutions'

Lees instructies voor gebruik

**ALVORENS U GEBRUIK GAAT MAKEN VAN UW NIEUWE EXCEL® CLICK & GO DIENT U, EN INDIEN VAN TOEPASSING  
UW BEGELEIDER, EERST DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG DOOR TE LEZEN.  
U DIENT KENNIS TE NEMEN VAN ALLE MOGELIJKHEDEN EN RESTRICTIES VAN UW EXCEL®CLICK & GO.**

### Algemene introductie

U heeft zojuist een Click & Go gekocht van Van Os Medical B.V. en wij willen u bedanken voor het vertrouwen in onze EXCEL® producten. De EXCEL® Click & Go is een echt kwaliteitsproduct.

Het beleid van Van Os Medical B.V. is om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. Wij behouden ons dan ook het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen in deze handleiding.

Het is belangrijk dat u deze handleiding voor het gebruik van de Click & Go aandachtig doorleest. De handleiding bevat belangrijke informatie over het veilig gebruiken en de onderhoud van uw Click & Go. Wij raden u aan deze handleiding goed te bewaren, het is namelijk ook uw garantiebewijs en hij kan u later nog goed van pas komen.




De veiligheidsvoorschriften in deze handleiding zijn algemene aanwijzingen die gezien moeten worden als globale richtlijnen. Het is mogelijk dat u uw eigen manieren ontwikkelt voor veel voorkomende handelingen.

Uw nieuwe Click & Go heeft frequent en schematisch onderhoud nodig. Veel van dit onderhoud kunt u zelf doen. Wij willen u echter aanraden om uw Click & Go één keer per jaar te laten nakijken door een deskundige. Een onderhoudsschema en een probleemanalyse tabel zijn in deze handleiding terug te vinden.

Verder vindt u in deze handleiding tevens een uitgebreide beschrijving van alle instelmogelijkheden van uw Click & Go. Veel van deze instelmogelijkheden vereisen, net als reparaties aan uw Click & Go, de kennis van een deskundige. Wij adviseren u dan ook om deze door een deskundige te laten uitvoeren.

### Let op!!!

In deze handleiding vindt u tevens informatieve opmerkingen, aanbevelingen en waarschuwingen. Deze zijn duidelijk te herkennen aan de gebruikte symbolen en de weergave van de tekst.

- |  |                     |   |
|--|---------------------|---|
|  | <b>Tip</b>          | Informatieve informatie   |
|  | <b>Aanbeveling</b>  | <b>Indien u deze aanbeveling niet wordt opgevolgd kan er schade ontstaan aan uw rolstoel</b>                |
|  | <b>Waarschuwing</b> | <b><i>Waarschuwingen dienen, om persoonlijke verwondingen te voorkomen, altijd opgevolgd te worden.</i></b> |

Vul hieronder de gegevens van uw geautoriseerde dealer in:

Bedrijfsnaam: .....

Adres: .....

.....

Telefoonnummer: .....

Faxnummer: .....

Emailadres: .....


Website: .....

# Inhoudsopgave

<b>1. IDENTIFICATIE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ALGEMENE UITLEG OVER UW CLICK &amp; GO .....</b>	<b>4</b>
2.1 INHOUD .....	4
2.2 COMPONENTEN EN OPBOUW VAN DE CLICK & GO .....	4
2.3 ALGEMENE UITLEG VAN UW CLICK & GO .....	5
2.4 GEBRUIK VAN DE ACCU EN LADER VAN UW CLICK & GO .....	6
2.5 GEBRUIK VAN DE ONTKOPPELINGSSTANG VAN UW CLICK & GO .....	6
<b>3. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN .....</b>	<b>7</b>
3.1 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN .....	7
3.2 WAARSCHUWINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK .....	7
<b>4. ONDERHOUD .....</b>	<b>9</b>
4.1 SERVICE CHECKLIST .....	9
<b>5. PROBLEEM ANALYSE EN OPLOSSINGEN .....</b>	<b>10</b>
<b>6. GARANTIE .....</b>	<b>11</b>
6.1 GARANTIE TOEPASSING .....	11
6.2 GARANTIEBEPALINGEN .....	11

## 1. IDENTIFICATIE

Uw Click & Go is voorzien van een uniek identificatie nummer. U kunt dit nummer terug vinden onder de accu van uw Click & Go. Hieronder vind u een voorbeeld van het framelabel waarop u het identificatienummer kunt vinden. Verder vind u de uitleg van de verschillende gegevens die op het framelabel vermeld staan.

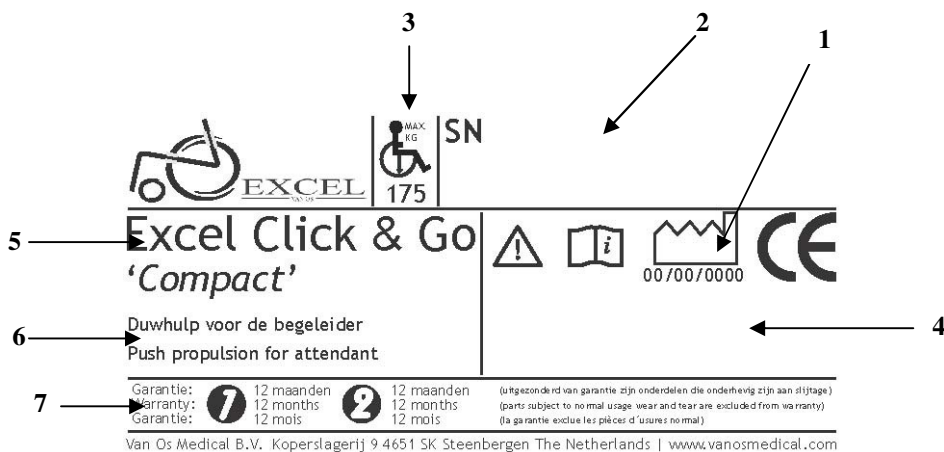

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>1. Productie datum</b>    | De datum waarop uw Click & Go is gefabriceerd.  |
| <b>2. Serie nummer</b>       | Iedere Click & Go heeft zijn eigen uniek serienummer. U dient dit nummer bij de hand te hebben als u technische vragen heeft of onderdelen wilt bestellen voor uw Click & Go.   |
| <b>3. Maximum gewicht</b>    | Het maximaal toelaatbare gebruikers gewicht (hou rekening met het gewicht van uw rolstoel) voor uw Click & Go.  |
| <b>4. Type nummer</b>        | Dit nummer geeft aan welke type Click & Go u heeft. U dient dit nummer bij de hand te houden als u technische vragen heeft of onderdelen wilt bestellen voor uw Click & Go.   |
| <b>5. Modelnaam</b>          | De modelnaam van uw Click & Go begint met de merknaam Excel. De merknaam Excel en een aanvullende model beschrijving vormen de modelnaam van uw Click & Go. Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt over uw Click & Go is het belangrijk dat u de aanvullende modelbeschrijving van uw Click & Go bij de hand heeft. |
| <b>6. Gebruikstoepassing</b> | Waar kunt u uw Click & Go gebruiken.  |
| <b>7. Garantie</b>           | Hier wordt de garantietermijn op uw Click & Go weergegeven. Zie hoofdstuk 6 Garantie voor de uitgebreide garantievoorwaarden.   |

Naast het framelabel van Van Os Medical B.V., kan het zijn dat op uw rolstoel ook andere labels zitten. Dit kan een label van uw dealer zijn of een label met een verstrekingsnummer van uw gemeente. Deze zijn echter voor het gebruik van deze handleiding niet van belang.

## 2. ALGEMENE UITLEG OVER UW CLICK & GO

### 2.1 Inhoud

Inhoud van uw Click & Go:

- Motor met accubak
- Accuset inclusief draagtas
- Accu lader
- Handbedieningskastje
- Gebruikershandleiding
- Twee sleutels

### 2.2 Componenten en opbouw van de Click & Go



1	Aandrijfwielen	4	Montage frame
2	Accu Pack	5	Bedieningshendel
3	Acculader		

Uw Click & Go is voorzien van verschillende componenten en onderdelen. Leer deze kennen voordat u verder gaat met het bestuderen van deze handleiding.

Het kan zijn dat uw Click & Go voorzien is van opties en accessoires die niet zijn afgebeeld op de voorbeeldtekening. Deze komt u echter vanzelf tegen tijdens het bestuderen van deze handleiding.

#### Specificaties

Maximum snelheid	5,5 km
Bereik	16 km
Motor	75 W - 280 W
Accu	12 V / 20 AH
Oplader	3Ah/12V
Wielen	8" PU x 2 pcs
Max. gebruikersgewicht	135 KG
Maten L x B x H	30 cm x ... x 24,5 cm
Transport gewicht	6,4 KG
Gewicht accu	6,8 KG
Totaal gewicht	13,2 KG
Geschikt voor rolstoel met breedte	40 - 55 cm

Ontwerpen en specificaties kunnen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

## 2.3 Algemene uitleg van uw Click & Go

In uw geval is uw Click & Go uitgevoerd als traveller, dat wil zeggen dat de Click & Go alleen voortbewogen kan worden door iemand die zich achter de rolstoel bevindt. Uw Click & Go is speciaal ontwikkelt om uw begeleider te helpen met het duwen van uw rolstoel.

Wanneer u gebruik wilt maken van de Click & Go dient u deze eerst, door de band waarmee de Click & Go aan het duwhandvat hangt met uw hand los te maken, op de grond te plaatsen. Let op u dit hierbij de Click & Go wel te ondersteunen. Zie figuur 1.

Tevens vindt u een sleutel op de bedieningshendel van de Click & Go om uw Click & Go in- en uitschakelen, zie figuur 2.



Figuur 1



Figuur 2

Aan de rechter-, of linkerkant van uw rolstoel, afhankelijk van uw eigen voorkeur, vindt u een bedieningshendel op het duwhandvat. Wanneer u de Click & Go heeft ingeschakeld kunt u met de draaiknop die op de gashendel zit de maximale snelheid regelen. U kunt de snelheid van de Click & Go verhogen door de knop naar rechts te draaien en de snelheid verlagen door de knop naar links te draaien, zie figuur 3. Door de gashendel in te knijpen stelt u de Click & Go in werking, zie figuur 4. Hoe verder de hendel naar boven wordt bewogen hoe sneller de Click & Go gaat rijden.



Figuur 3



Figuur 4

Aan de zijkant van de bedieningshendel bevindt zich nog een schakelknop. Hiermee bepaalt u of de Click & Go vooruit danwel achteruit rijdt, zie figuur 5.



Figuur 5

## 2.4 Gebruik van de accu en lader van uw Click & Go

Uw Click & Go is uitgerust met onderhoudsvrije, gesloten fleeze accu's. Deze accu's dienen alleen opgeladen te worden, verder hebben ze geen onderhoud nodig. Mocht u andere accu's op uw Click & Go willen gebruiken kan dit, zorgt u er dan wel voor dat u goede onderhoudsmethodes van de acculeverancier ontvangt.

- ① **Waarschuwing:** De accu's die bij u Click & Go worden geleverd zullen waarschijnlijk leeg of gedeeltelijk geladen zijn. Het is van groot belang voor de levensduur, kracht en bereik van de accu, dat u deze eerst volledig oplaad.

Wanneer de accu leeg is dient u deze accu op de volgende manier op te laden:

1. Zorg ervoor dat de Click & Go is uitgeschakeld;
2. Plug de accu laadkabel in de laadplug aan de achterkant van uw Click & Go;
3. Sluit de lader aan op een stopcontact;
4. Uw Click & Go wordt nu opgeladen. Tijdens het laden zult u de voortgangsindicatie lampjes zien knipperen op de lader. Uitleg van de kleur van de lampjes op de lader:
  - Een rood lampje betekent dat de lader in gebruik is;
  - Een groen lampje betekent dat de Click & Go is opgeladen.

## 2.5 Gebruik van de ontkoppelingstang van uw Click & Go

### Ontkoppelen van de Click & Go


Om de Click & Go te ontkoppelen dient u met uw voet op de beide gele hendels te drukken, zie figuur 6. Hierdoor wordt de montage buis ontkoppeld en kunt u de Click & Go van onder de rolstoel verwijderen.

Als u de Click & Go volledig van de rolstoel wilt verwijderen dient u ook het spiraalsnoer van de bedieningshendel los te maken en de band die rond het duwhandvat zit.

### Aankoppelen van de Click & Go

Om de Click & Go onder de rolstoel te plaatsen dient u de Click & Go onder uw rolstoel te rijden totdat de montage buis tegen het bevestigingsblok staat. Kantel de Click & Go naar achteren en klik de montagebuis in het bevestigingsblok.

Bevestiging nu de zwarte band aan het duwhandvat en het spiraalsnoer aan de bedieningshendel, zie figuur 7. Controleer of de Click & Go vast zit voordat u met de Click & Go gaat rijden.

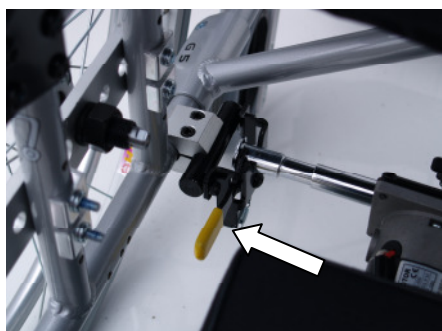

Figuur 6



Figuur 7

### 3. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

VAN OS MEDICAL B.V. stelt zich niet verantwoordelijk voor verwondingen aan de gebruiker of schade aan eigendommen, indien bij het gebruik van de Click & Go de aanbevelingen en waarschuwingen niet zijn opgevolgd.

De EXCEL® Click & Go is, indien de omgangsregels zoals deze beschreven staan in deze handleiding worden opgevolgd, een uiterst veilig en stabiel product. Het is echter wel mogelijk dat, wanneer de EXCEL® Click & Go niet correct wordt gebruikt, er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Dit geldt echter voor alle duwhulpmiddelen.

#### 3.1 Algemene Veiligheidsvoorschriften

Bescherm uw aankoop door uw EXCEL® Click & Go regelmatig te laten controleren. Wanneer er een deel van uw EXCEL® Click & Go niet goed functioneert, is het mogelijk dat er een gevaarlijke situatie ontstaat. Periodieke inspectie, een correcte instelling van uw Click & Go en rolstoel en tijdige vervanging van kapotte en versleten onderdelen zal resulteren in een jarenlang probleemloos gebruik van uw Click & Go met uw rolstoel. Een gekwalificeerde EXCEL® dealer, die alleen EXCEL® vervangingsonderdelen zal gebruiken, zal er voor zorgen dat de lange levensduur gewaarborgd blijft door goed en preventief onderhoud.

#### **Waarschuwing:**

*U dient uw Click & Go in een goede staat te houden om de veiligheid in gebruik en omgang te kunnen waarborgen.*

#### 3.2 Waarschuwingen voor veilig gebruik

Hieronder vindt u enkele waarschuwingen waarbij, indien u deze waarschuwing opvolgt, veilig gebruikt kunt maken van uw Click & Go:

#### **Waarschuwingen:**

- *Neem nooit passagiers mee tijdens het rijden met de Click & Go.*
- *Rij nooit schuin een helling op of af.*
- *Ga nooit met drank op rijden met uw Click & Go.*
- *Zorg dat er tijdens het gebruik van de Click & Go geen communicatiemiddelen aanstaan, zoals scanners, 27 MC's of mobiele telefoons. Deze kunnen namelijk een storing veroorzaken op de besturing van de Click & Go.*
- *Rij nooit in druk verkeer.*
- *Rij nooit naast een rivier, haven of andere aanverwante wateren, wanneer daar geen afscheiding of railing aanwezig is.*
- *Rij bij voorkeur niet tijdens regen.*
- *Rij niet door sneeuw of tijdens sneeuwval.*
- *Rij nooit naast de gebaande wegen of op al te oneven oppervlaktes.*
- *Rij nooit in het donker, tenzij uw rolstoel is uitgerust met een voor- en achterlicht (wij raden u aan om fietslampjes op batterijen te kopen voor uw rolstoel).*
- *Verzekert uzelf er van dat er zich geen obstakels achter u bevinden wanneer u achteruit rijdt. Wij bevelen aan om zo langzaam mogelijk achteruit te rijden.*
- *Stop niet onverwachts, slinger niet en maak geen onverwacht scherpe bochten.*
- *Houdt uw handen op de armleuningen en uw voeten op de voetsteunen.*
- *Probeer geen randen hoger dan 5 cm te beklimmen.*
- *Probeer nooit door een gat dieper dan 7 cm te rijden.*
- *Beklim geen heuvels met een grotere stijging dan 10 graden.*
- *Rij nooit achteruit wanneer u op een helling rijdt. Altijd vooruit. De Click & Go kan dan kantelen.*
- *Wees altijd voorzichtig wanneer u over oneven of onbeschermd oppervlaktes rijdt. Zoals gras, gravel of andere oneven oppervlaktes.*
- *Rij altijd langzaam van een helling af. Wanneer u van een helling afrijdt zal de Click & Go altijd moeilijker te besturen worden. Ook heeft u een langere remweg.*
- *Stap niet in en uit uw rolstoel op een helling.*
- *Rij hellingen altijd recht op.*



# CERTIFICATE



EN 12183  
EN 1041

ISO 7176-15  
ISO 7176

## Product identification

Product : *Electric Powered wheelchair support system*  
Brand : *Excel*  
Model/type : *Click & Go*  
Version : *'Lite'*

## Manufacturer:

Name : *Van Os Medical B.V.*  
Address : *Koperslagerij 9*

Country : *The Netherlands*

## EU Representative:

Name : *W. van Os*

Address : *Koperslagerij 9*

Country : *The Netherlands*

Function : *Director*

## Technical constructed file

Prepared by: Name : *J.M.J. Brouwer BBA*  
Function: *Research and Development*  
Issue date: *01 - 04 - 2009*  
TCF date: *01 - 04 - 2009*  
Recertification date: -

Certificate/report no.:

Crash test report no. according to ISO 7176/19:

## Means of conformity

The product is in conformity with Directive 93/42/EEG based on the use of a Technical construction file in accordance with Article 9 (Class I products) of the Directive

Signature of EU representative:

Place : *Steenbergen*

Date : *01 - 04 - 2009*

Number: *VOS.TCF.CG.0811*

## 4. ONDERHOUD

U dient uw Excel® Click & Go regelmatig te laten controleren.

Wij raden u aan om minstens één keer per jaar uw Click & Go te laten controleren door een gekwalificeerde EXCEL® dealer, die alleen EXCEL® vervangingsonderdelen zal gebruiken. Deze periodieke inspectie zal ervoor zorgen dat uw Click & Go jarenlang perfect zal functioneren.

Indien u ook regelmatig zelf de Click & Go controleert en (klein) onderhoud uitvoert, verlengt dit de levensduur van uw Click & Go en het verhoogt het, het gebruikersgemak.

### Accu's

Voor optimaal gebruik en maximale levensduur van uw accu's dient u ervoor te zorgen dat u de accu's zover mogelijk leeg rijdt voordat u de accu's weer gaat opladen. Tevens moet u wanneer u de accu's gaat opladen ervoor zorgen dat u ze volledig oplaad voordat u ze weer gaat gebruiken.

### Schoonmaken

Na ieder gebruik dient u de Click & Go schoon te maken van straatvuil. Dit verlengt de levensduur van de Click & Go en zorgt voor meer comfort bij elk volgend gebruik.

## 4.1 Service checklist

Voor een optimale levensduur dient uw Click & Go periodiek onderhouden te worden door een geautoriseerde dealer.

Service interval:.....	Service Schema								
Service beurt nummer	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wielen/banden: o.a. profiel									
Ontkoppelingsmechanisme: o.a. speling									
Koolborstels van de motor									
Gashendel: o.a. werking accumeter, snelheidsregelaar									
Electrisch mechanisme: o.a. bedrading, aansluiting									
Gecontroleerd door (paraaf)									
Controle datum									

### Service stempel dealer

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

In de praktijk verschilt de gebruiksintensiteit sterk van persoon tot persoon. Het kan dus zijn dat in uw geval de Click & Go vaker of minder vaak dan eens per jaar een servicebeurt nodig heeft.

✳ Onderhoud valt niet onder de garantie. Uw dealer mag afwijken van het onderhoudinterval.

## 5. PROBLEEM ANALYSE EN OPLOSSINGEN

Uw EXCEL® Click & Go is geïnspecteerd en aangepast zodat u deze onmiddellijk in gebruik kan nemen. U dient echter wel uw Click & Go te onderhouden, speciaal als de instellingen van de fabriek zijn gewijzigd.

Hieronder in de tabel vindt u veel voorkomende problemen met de mogelijke oorzaken en de juiste oplossing daarbij.

☛ Wij raden u aan om alleen EXCEL® vervangingsonderdelen te gebruiken. Indien u geen originele EXCEL® onderdelen gebruikt. Vervalt de garantie op uw Click & Go.

KNIPPERCODE	FOUT	OPLOSSING
1x	Accu's bijna leeg	Accu opladen
2x	Accu's te leeg	Accu opladen
3x	Accu's te vol	Accu ontladen
4x	Stoomstoring	Zet de Click & Go uit, wacht een paar minuten en zet de Click & Go weer aan.
5x	Niet in gebruik	
6x	Niet in gebruik	
7x	Potmeter fout	Controleer motorrem en bedrading
8x	Niet in gebruik	
9x	Interne fout	Neem contact op met een geautoriseerde Excel dealer

☛ Indien u problemen ondervindt die u niet terug kunt vinden in de bovenstaande tabellen adviseren wij contact op te nemen met een gekwalificeerde Van Os Medical B.V. dealer.

## 6. GARANTIE

### 6.1 Garantie toepassing

Op uw Click & Go heeft u fabrieksgarantie. Het kan echter ook mogelijk zijn dat uw leverancier een aanvullende garantie heeft aangeboden. In deze handleiding gaan we echter uitsluitend in op de fabrieksgarantie die wordt gegeven door Van Os Medical B.V.

De fabrieksgarantie wordt alleen toegekend aan u als consument. Het is niet toegestaan de garantie commercieel te gebruiken (zoals voor verhuur of institutioneel gebruik). De garantie is beperkt tot defecte materialen en eventuele verborgen gebreken. VAN OS MEDICAL B.V. garandeert u de volgende garantietermijnen:

**De garantie op uw Click & Go bedraagt 12 maanden. Deze garantie geldt niet op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn en op de accu's van de Click & Go.**

Tevens vindt u de garantietermijnen op het framelabel van uw Click & Go. Zie hoofdstuk 1.

Garantie:	<b>1</b>	12 maanden	<b>2</b>	12 maanden	(uitgezonderd van garantie zijn onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage)
Warranty:	<b>1</b>	12 months	<b>2</b>	12 months	(parts subject to normal usage wear and tear are excluded from warranty)
Garantie:	<b>1</b>	12 mois	<b>2</b>	12 mois	(la garantie exclue les pièces d'usures normal)

### 6.2 Garantie bepalingen

Uw handleiding is tevens uw garantieformulier, vul de relevante gegevens in en bewaar deze dan zorgvuldig.

#### Garantie voorwaarden

De garantieperiode start op de datum van de aankoop van uw Click & Go. Als in de garantietermijn uw rolstoel kapot gaat, zal deze worden gerepareerd of vervangen. U dient echter wel met Van Os Medical B.V. een volledig ingevulde Garantie Registratie Kaart of een kopie van de rekening met de datum van aankoop kunnen overleggen. Zonder een Garantie Registratie Kaart of een bewijs van de aankoopdatum zal de garantie beginnen op de datum waarop Van Os Medical B.V. de rekening naar de dealer heeft gestuurd.

Reparaties en vervangingen zullen uitgevoerd worden bij een geautoriseerde Van Os Medical B.V. service agent. Om in aanmerking te komen voor de garantie, dient uw Click & Go aan de vereiste verzorging te voldoen. Verder dient u, indien er zich een probleem voordoet, de betreffende Van Os Medical B.V. service agent onmiddellijk te waarschuwen en deze volledig op de hoogte te stellen van de aard van het probleem. Indien u de Click & Go gebruikt buiten het gebied van de aangewezen Van Os Medical B.V. service agent die de garantie uit dient te voeren, dan kunnen de werkzaamheden uitgevoerd worden bij iedere andere, door de fabriek aangewezen, service agent.

Wanneer een onderdeel van de Click & Go, binnen 12 maanden vanaf de aankoopdatum, reparatie nodig heeft of vervangen moet worden, ten gevolge van een fabriek of materiaal fout, en de Click & Go in het bezit is van de eerste eigenaar, zal het betreffende onderdeel of de onderdelen, kosteloos bij de geautoriseerde dealer gerepareerd of vervangen worden.

De garantie omvat echter geen arbeidskosten die gemaakt worden bij vervanging.

**De garantie is niet overdraagbaar.**

Ieder vervangen of gerepareerd onderdeel valt onder dezelfde garantietermijnen als de totale Click & Go. Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn vallen normaal gesproken niet onder de garantie, tenzij deze onderdelen slijtage vertonen als direct gevolg van een fabrieksfout. Ook de accu's van uw Click & Go vallen niet onder deze garantie.

Bovenstaande garantievoorwaarden omschrijven alle Click & Go onderdelen en gelden voor de modellen die gekocht zijn voor de normale verkoopprijs.

Onder normale omstandigheden accepteert Van Os Medical B.V. geen verantwoordelijkheid indien de Click & Go vervangen moet worden of reparaties nodig heeft als gevolg van:

1. Het niet onderhouden van de Click & Go en de onderdelen in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant, of het niet gebruiken van gespecificeerde originele onderdelen;
2. Het beschadigen van de Click & Go of de onderdelen door onachtzaamheid, ongeval of verkeerd gebruik;
3. Het aanpassen van de Click & Go of de onderdelen, afwijkend van de fabrieksspecificaties, of reparaties die gedaan zijn voordat de service agent gewaarschuwd is;
4. Indien het product niet voorzien is van een origineel fabrieks framelabel, zie hoofdstuk 1.

De Click & Go die beschreven en getoond wordt in deze handleiding kan in details afwijken van uw eigen model. Echter, alle instructies zijn relevant, onafhankelijk welke details verschillend zijn. Wij houden ons het recht voor om zonder mededeling vooraf, wijzigingen aan te brengen in gewicht, afmeting of andere technische gegevens zoals beschreven in deze handleiding. Alle tekeningen, afmetingen en capaciteiten welke in deze handleiding getoond worden, zijn ongeveer en hoeven niet volledig in overeenstemming te zijn met de gegeven specificaties.

### **Waarschuwing:**

Van Os Medical B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke consequentie of incidentele schade dan ook. Hoewel deze handleiding met zorg is samengesteld is deze niet uitsluitend. Indien u uw Click & Go niet in overeenstemming met de voorschriften, die in deze handleiding staan, gaat gebruiken dient u dit eerst te overleggen met een geautoriseerde Van Os Medical B.V. dealer. De garantie is uitsluitend geldig gedurende de aangegeven periode en is alleen geldig in Nederland. Indien er aanpassingen aan de Click & Go zijn gedaan, die van structurele invloed zijn op het product, vervalt de garantie volledig. U kunt contact opnemen met Van Os Medical B.V. voor de uitgebreide garantie- en leveringsvoorwaarden en een adressenlijst met geautoriseerde dealers.

Neem voor de garantieservice contact op met de geautoriseerde dealer waar u uw Click & Go heeft gekocht. Mocht het voorkomen dat u niet naar tevredenheid wordt geholpen door uw dealer, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met Van Os Medical B.V. Ons adres vindt u op de voorzijde van deze handleiding.

# EXCEL



## EXCEL

VAN OS

VAN OS MEDICAL B.V.  
Koperslagerij 9  
4651 SK Steenberg  
The Netherlands

Tel.: +31 (0) 167 573020  
Fax: +31 (0) 167 573381  
E-mail: [sales@vanosmedical.nl](mailto:sales@vanosmedical.nl)

[www.vanosmedical.nl](http://www.vanosmedical.nl)